

Многофункциональный баротерапевтический аппарат МКВ-01 «ИВАВИТА» – новая перспектива в решении проблемы восстановления и сохранения мужского и женского здоровья.

6 в 1

Эффективность аппарата МКВ-01 «ИВАВИТА» подтверждена:

- НИИ Уронефрологии и репродуктивного здоровья человека при первом МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
 - Научным центром акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова (Москва)
 - Клиникой урологии МГМСУ (Москва)
 - ФГБУЗ "Центральная клиническая больница Российской академии наук" (Москва)
 - Отделом сексопатологии Московского НИИ психиатрии — филиала ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского» Минздрава России (Москва)
 - Клиникой урологии ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского (Саратов)
- А также в частных клиниках г.г. Саратова (МЦ «Врачебная практика»), Нижнего Новгорода, Владимира, Пятигорска, Екатеринбург, Москвы, Кисловодска, Евпатории, Эссентуков, Челябинска, Нижнего Тагила, Иваново и др.



Области применения: Акушерство и гинекология, урология, физиотерапия. Может использоваться в лечебно-профилактических, санаторно-курортных учреждениях.

МКВ-01 «ИВАВИТА» - это программируемая профессиональная медицинская система для проведения компрессионной, вакуумной и комбинированной компрессионно-вакуумной терапии и профилактики заболеваний мочеполовой сферы у мужчин и женщин. Аппарат строго дозированно и бережно оказывает механическое воздействие на органы и ткани мочеполовой системы с помощью оригинальных наконечников.

В аппаратной методике пневмовибромассажа одновременно участвуют два физических фактора, обладающих синергическим действием: пневмомассаж и низкочастотная пульсация (вибрация).

Основные технические данные и характеристики:

Режимы работы:

«КОМПРЕССИЯ», «ВАКУУМ», «КОМПРЕССИЯ+ВАКУУМ»

В режиме «Компрессия»:

длительность серии импульсов давления воздуха - от 0 до 30 с., избыточное давление в наконечнике в импульсе в диапазоне от 0 до 50 кПа.

В режиме «Компрессия+Вакуум»:

длительность серии импульсов давления воздуха - от 0 до 30 с., длительность серии импульсов разрежения воздуха - от 0 до 30 с.

В режимах «Вакуум», «Компрессия+Вакуум» на выходе «Вакуум» разрежение в импульсе в диапазоне от 0 до 50 кПа.

Автоматическое выключение насоса в критических ситуациях:

при разгерметизации наконечников, при превышении избыточного давления 60 кПа или при разрежении 60 кПа в наконечниках.

Встроенный таймер и звуковой излучатель.

Типы наконечников: 1) для вакуум-фаллостимуляции, 2) для пневмомассажа ректально-вагинальный, 3) комбинированный, 4) аспирационный.

Габаритные размеры (без наконечников и кабеля питания) не более 450x450x220 мм.

Масса (с наконечниками и кабелем питания) не более 6,0 кг.

Лечебные эффекты:

- Противовоспалительный
- Антигипоксический
- Противоотечный
- Гемодинамический
- Антисклеротический
- Дренирующий
- Санирующий
- Анальгезирующий
- Рефлексогенный
- Эректогенный (♂)



КЛИНИКА
ПРОФЕССОРА
ЧУРАКОВА
1993



ООО «ИВАВИТА»
Адрес: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 122/126
тел.: (8452) 52-18-48, 52-18-66
www.ivavita.ru, ivavita.pф; e-mail: iva.vita@mail.ru



ПРИМЕНЕНИЕ В ГИНЕКОЛОГИИ

Гинекологический пневмовибромассаж

Показания:

- Хронический эндометрит;
- Хронический сальпингит;
- Хронический сальпингоофорит;
- Бесплодие;
- Синдром тазовых болей;
- Сексуальные расстройства;
- Профилактика недержания мочи;
- Профилактика воспалительно-дегенеративных процессов и фиброза в тканях тазовых органов;
- Прегравидарная подготовка эндометрия, в т.ч. перед программами вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ВМИ);

Вакуумный массаж и дренирование шейки матки

Показания:

- Хронический эндоцервицит;
- Хронический цервицит;
- Санация шейки матки, в т.ч. перед программами вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО, ВМИ);
- Забор клинических образцов из эндоцервикса для повышения точности этиологической диагностики.

Комбинированная

компрессионновакуумная терапия

Сочетает и потенцирует лечебные эффекты

- вакуумного дренирования шейки матки и гинекологического пневмовибромассажа.



ПРИМЕНЕНИЕ В УРОЛОГИИ

Урологический пневмовибромассаж

Показания:

- Хронический простатит/синдром хронической тазовой боли(ХП/СХТБ);
- Профилактика воспалительно-дегенеративных процессов и фиброза в тканях тазовых органов;

Вакуум-фаллостимуляция

Показания:

- Диагностика и лечение эректильной дисфункции;
- Профилактика воспалительно-дегенеративных процессов и фиброза в тканях полового члена.

Комбинированная

компрессионновакуумная терапия

Сочетает и потенцирует лечебные эффекты

- вакуум-фаллостимуляции и урологического (ректального) пневмовибромассажа.

11 ОСНОВНЫХ ПРИЧИН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ АППАРАТА МКВ-01 «ИВАВИТА»

- Многофункциональность (6 технологий в одном аппарате)
- Высокая клиническая эффективность
- Применение аппарата показано при наиболее распространенных гинекологических и урологических заболеваниях
- Минимум противопоказаний
- Безопасность: строго дозированное упруговолновое механическое воздействие, благодаря отсутствию электромагнитного излучения и гипертермического эффекта, нет риска стимуляции пролиферативных процессов
- Эксклюзивность - в настоящее время аппарат не имеет аналогов для применения в гинекологии и урологии
- Решение проблем рационального использования лечебных помещений
- Наличие индивидуальных (одноразовых) силиконовых наконечников для пневмомассажа
- Быстрая окупаемость и стабильный доход
- Продолжительная и бесперебойная работа
- Генерирует пневмоимпульсы в диапазоне частот биомеханического резонанса человека



ООО "ИВАВИТА"

Адрес: 410071, г. Саратов, ул. Шелковичная, 122/126

тел.: (8452) 52-18-48, 52-18-66

www.ivavita.ru, ивавита.рф; e-mail: iva.vita@mail.ru